



3. Izņemiet visus piederumus no kāju pēdu cauruļu komplekta.



4. Izņemiet kāju pēdu cauruli.



9. Otrā puse tiek uzstādīta tādā pašā veidā. Abas kājas ir pabeigtas.



10. Izņemiet centrālā balsta komplektu. Jānovieto tā, lai ērtāk montētu. Pievērsiet uzmanību drošībai, kad to izņemat un montējat, jo tas ir smags.



5. Izņemiet riteņus, nospiediet riteņu bremzes pirms ievietošanas kāju pēdu cauruļu atverē.



6. Kā parādīts attēlā, secīgi ievietojiet blīves un uzgriežņus, pēc tam pievelciet tos ar uzgriežņu atslēgu.



11. Izņemiet visas skrūves un piederumus.



12. Ievietojiet skrūves un blīves attiecīgajos caurumos bultiņu virzienā un pievelciet tās ar uzgriežņu atslēgu.



7. Pēc riteņu bloķēšanas pievienojiet skrūvju putekļu necaurlaidīgos vāciņus.



8. Viena kāja ir pabeigta.



13. Montāža ir pabeigta.



14. Novietojiet otru kāju pēdu cauruli.



15. Ievietojiet skrūves un blīves atbilstošajos caurumos bultiņu virzienā, pievelciet tās ar uzgriežņu atslēgu.



16. Apakšējais rāmis ir pabeigts.



21. Otrā pusē sēdekļa rāmis arī tiek ievietots galvenajā korpusā.



22. Ievietojiet garās skrūves caurumā, fiksējiet ar uzgriežņiem.



17. Izņemiet visus sēdekļa rāmiņus paredzētos skrūvju piederumus.



18. Izņemiet sēdekļa rāmi un ievietojiet to atbilstošajā galvenā rāmja pozīcijā.



23. Nostipriniet garo skrūvi un uzgriežņus ar divām atslēgām.



24. Rāmja uzstādīšana ir pabeigta.



19. Ievietojiet garo skrūvi caurumā, nofiksējiet to ar uzgriežņi.



20. Ar divām uzgriežņu atslēgām pievelciet garās skrūves un uzgriežņus (Piezīme: skrūvēm un uzgriežņiem jābūt stingri fiksētiem, jo tā ir svarīga pagriešanās pozīcija).



25. Izņemiet visus rokturu piederumus, kā parādīts attēlā.



26. Ievietojiet rokturi rāmja atverē.



27. Pievienojiet sprādzi, lai to nostiprinātu.



28. Rokturu uzstādīšana ir pabeigta.



33. Nostipriniet hidrauliskā cilindra rokturi atbilstošā leņķī un nofiksējiet to ar iepriekš ievietotajām skrūvēm. Pēc tam pievelciet tās ar sešstūra formas uzgriežņu atslēgu.



34. Hidrauliskā cilindra uzstādīšana ir pabeigta.



29. Izņemiet uzglabāšanas somiņu, novietojiet to uz galvenā rāmja un nostipriniet.



30. Uzglabāšanas somiņas uzstādīšana ir pabeigta.



35. Attēls pēc hidrauliskā cilindra uzstādīšanas pabeigšanas.



36. Izņemiet visus iepriekš minētos piederumus.



31. Izņemiet hidrauliskā cilindra rokturi.




32. Ar uzgriežņu atslēgu ievietojiet hidrauliskā cilindra skrūvi.



37. Piestipriniet atzveltni pie sēdekļa rāmja caurules, atbilstošajos caurumos nofiksējiet ar vidēji lielajām skrūvēm pēc kārtas. Pievelciet ar sešstūra atslēgu.



38. Atzveltnes uzstādīšana ir pabeigta.

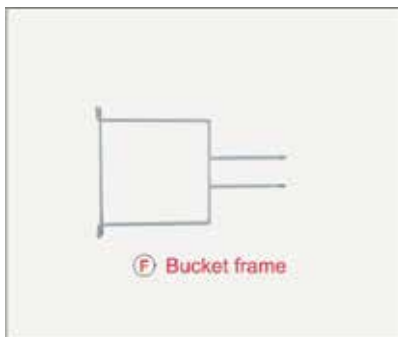

39. Izņemiet spaiņa rāmi.



40. Ievietojiet to galvenā rāmja atverēs.



45. Galveno rāmi var aprīkot arī ar mīkstiem sēdekļiem.



46. Visas iekārtas pilnīga uzstādīšana ir pabeigta.

Lietošanas instrukcija



41. Uzlieciet spaini uz rāmja.



42. Nostiprinot sēdekļa rāmi, pagrieziet savienojuma rokturi, līdz tas ir cieši nofiksēts.



1. Piestumiet un pagrieziet iekārtu gultas virzienā.



2. Atveriet drošības sprādzi.



43. Cieši nofiksējiet.



44. Galvenais rāmis ir aprīkots ar cietiem sēdekļiem.



3. Ar kājām nospiediet bremzes, atveriet drošības sprādzi un palīdziet nosēsties uz sēdekļa. Pēc tam aizveriet drošības sprādzi.



4. Pielāgojiet augstumu, viegli uzspiežot ar pēdu uz hidrauliskā cilindra rokturi. Nespiediet uz tā stipri, jo tas samazinās augstumu (Atgādinājums: pacelšanas laikā tikai viegli uzkāpiet uz tā, lai izvairītos no pacelšanas funkcijas kļūmēm).



Dažādi sēdekļu veidi
Vairākas iespējas nomainīt dušas sēdekli un krēsla sēdekli.



Stūrējošais ritenis
Drošs un ērts, nepagriezīsies pa kreisi vai pa labi pagriezienos.



Regulējams augstums
Drošs un uzticams, ērtāks lietošanai. Maksimālais augstuma regulējums: 87 ~ 102 cm.



Universāls ritenis
Drošs un ērts, var elastīgi pārvietoties pa ceļiem, kur ir pagriezieni.

