


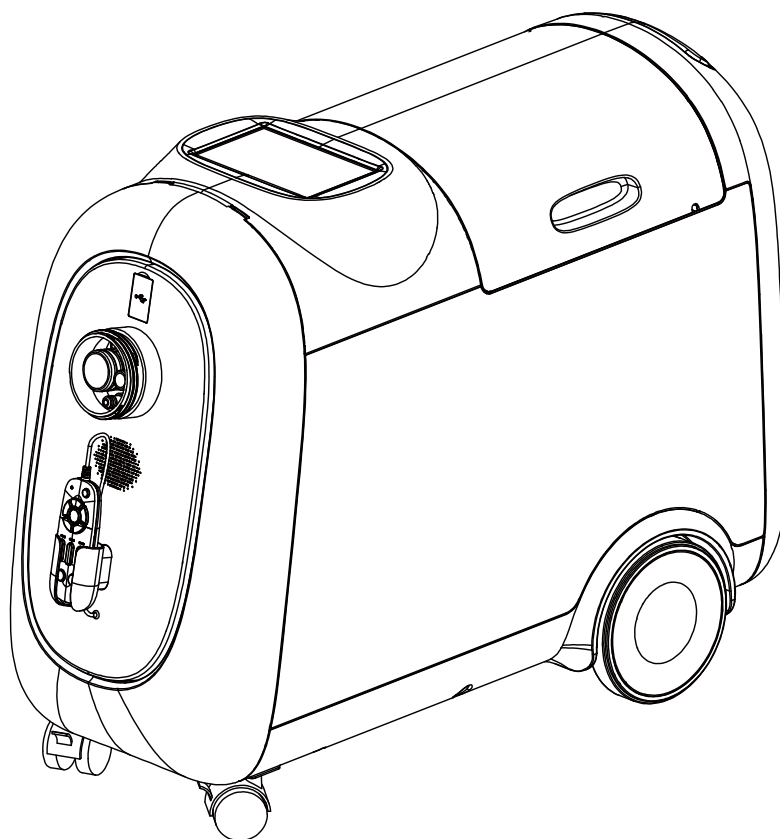

VIEDĀ NESATURĒŠANAS TĪRĪŠANAS ROBOTA LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

CE

SATURS

I. Produkta īpašības

1.1 Produktu saraksts	01
1.2 Produktu daļu nosaukumi	01
1.2.1 Resursdators	01
1.2.2 Tālvadības pults lietošanas instrukcija	02
1.2.3 Ūdens filtra tvertne, netīrā ūdens tvertne, dezodorējošo komponentu kārba	03
1.2.4 Displeja ekrāns	04

II. Uzstādīšana

2.1 Netīrā ūdens tvertnes uzstādīšanas metode	06
2.2 Ūdens filtra tvertnes uzstādīšanas metode	07
2.3 Dezodorēšanas komponentu uzstādīšanas metode	07
2.4 Šļaukas montāža ar resursdatora uzstādīšanu	08

III. Darbības

3.1 Piemērojamība cilvēkiem	09
3.2 Sagatavošanās ierīces palaišanai	09
3.3 Ierīces tīrīšana	09
3.4 Ierīces apkope	10
3.5 Lietošanas kārtība	10
3.6 Piesardzības pasākumi pirms un pēc ierīces lietošanas	11
3.7 Tīrīšana	11
3.8 Automātiskais režīms	12
3.9 Manuālais režīms	13
3.10 Parametru iestatīšana un pieprasīšana	13

IV. Drošības brīdinājumi

V. Produktu saraksts

VI. Iepakojuma saraksts

VII. Kā uzstādīt autiņbikses, bikses un viedās autiņbikses?

VIII. Uzstādīt šļūtenu komplektu un viedās autiņbikses

IX. Kā uzvilkt viedās autiņbikses uz cilvēka ķermeņa?

X. Viedo autiņbikses novilkšana no cilvēka ķermeņa

XI. Viedo autiņbikses tīrīšana un apkope

XII. Problēmu novēršana

XIII. Specifikācijas

IXV. Tehniskā apkope un remonts

XV. Produkta otrreizēja pārstrāde


XVI. Tehniskā apkope

XVII. Etiķetes, iepakojuma logotipa dizains

I. Produkta funkcijas


1.1 Produkta saraksts


Pirms lietošanas, lūdzu, pārbaudiet, vai visi tālāk norādītie vienumi ir iekļauti komplektā. Ja kāds no tiem trūkst, lūdzu, sazinieties ar savu tirgotāju.

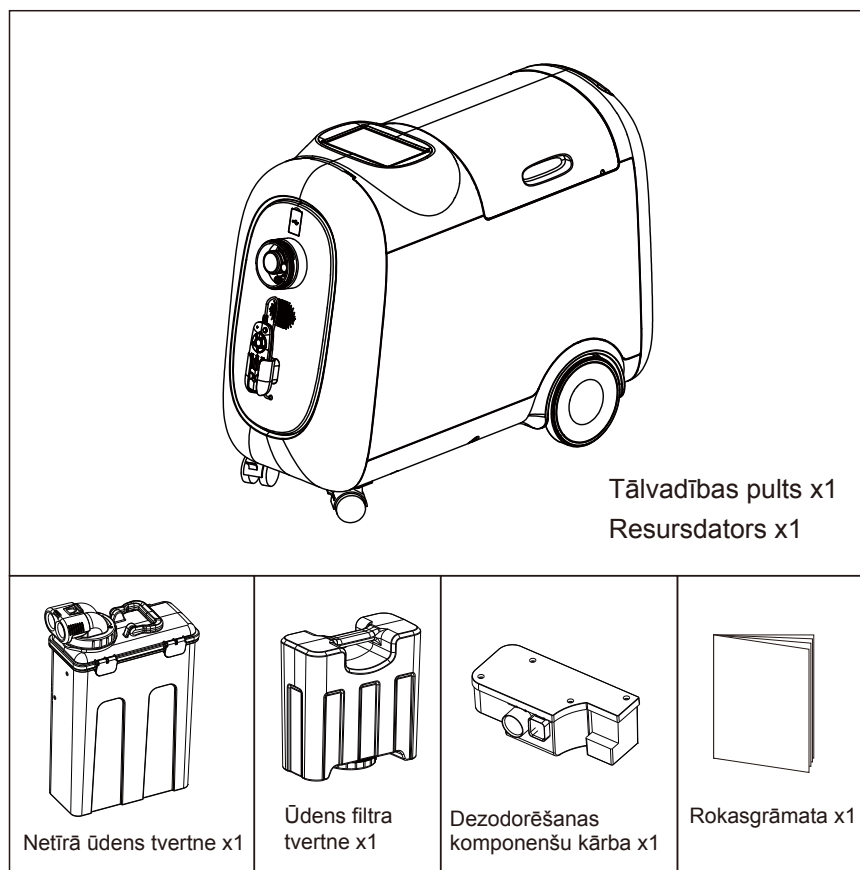

1.2 Produktu daļu nosaukumi

1.2.1 Resursdators

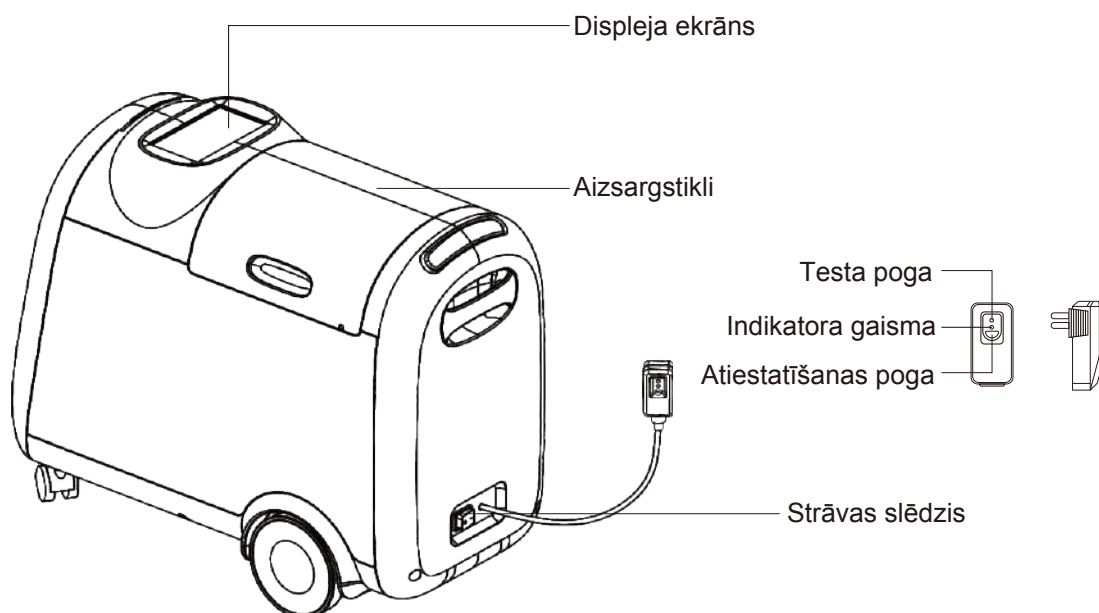


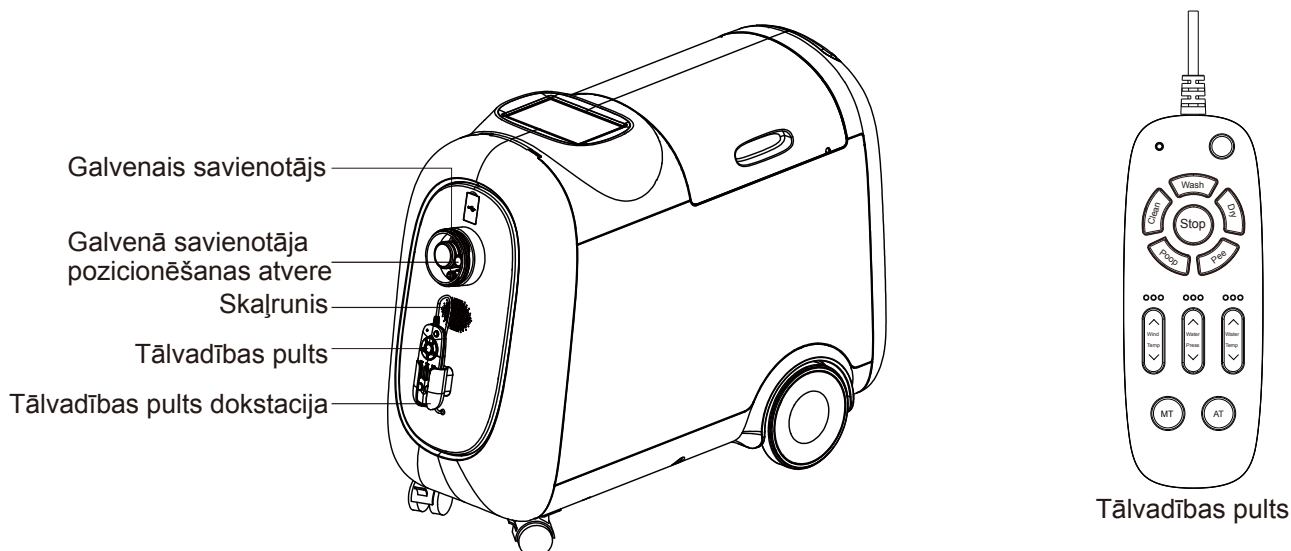


1.2.2 Tālvadības pults panela lietošanas instrukcija

	Stop poga: apturēt pašreizējo darbību;
	Augsta, vidēja un zema displeja atzīme: no zemas uz augstu, parāda gaisa plūsmas temperatūras intensitātes, ūdens temperatūru utt. iestatītās izmaiņas;
	Gaisa plūsmas temperatūras regulēšanas poga: pieskarieties pogas augšup vai lejup vērstajai bultiņai, lai regulētu augstu vai zemu gaisa plūsmas temperatūru; kopumā trīs regulējami līmeņi - augsts, vidējs un zems;
	Ūdens spiediena regulēšanas poga: lai regulētu ūdens spiediena stiprumu vai vājumu, pieskarieties pogas bultiņai uz augšu vai uz leju, lai regulētu ūdens spiediena stiprumu vai vājumu; kopumā trīs regulējami līmeņi - augsts, vidējs un zems;
	Ūdens temperatūras regulēšanas poga: pieskarieties pogas bultiņai uz augšu vai uz leju, lai regulētu augstu vai zemu ūdens temperatūru; kopumā trīs regulējami līmeņi - augsts, vidējs un zems;
	Poga "Poop": nospiediet šo pogu manuālajā režīmā, lai sāktu izkārnījumu apstrādes procedūru;
	Poga "Pee": nospiediet šo pogu manuālajā režīmā, lai sāktu urinācijas apstrādes procedūru;
	Tīrīšanas poga: nospiediet šo pogu manuālajā režīmā, lai noskalotu darba galviņas iekšējo virsmu;
	Mazgāšanas poga: nospiediet šo pogu manuālajā režīmā, lai ar siltu ūdeni notīrītu personas intīmās daļas;
	Žāvēšanas poga: nospiediet šo pogu manuālajā režīmā, lai sāktu žāvēšanu;
	Manuālā režīma poga: turiet šo pogu piespiestu ilgi, lai pārslēgtos uz manuālo režīmu;
	Automātiskā režīma poga: nospiediet un turiet pogu, tā pārslēgs uz manuālo režīmu.


1.2.3 Ūdens filtra tvertne, netīrā ūdens tvertne, dezodorēšanas kārba

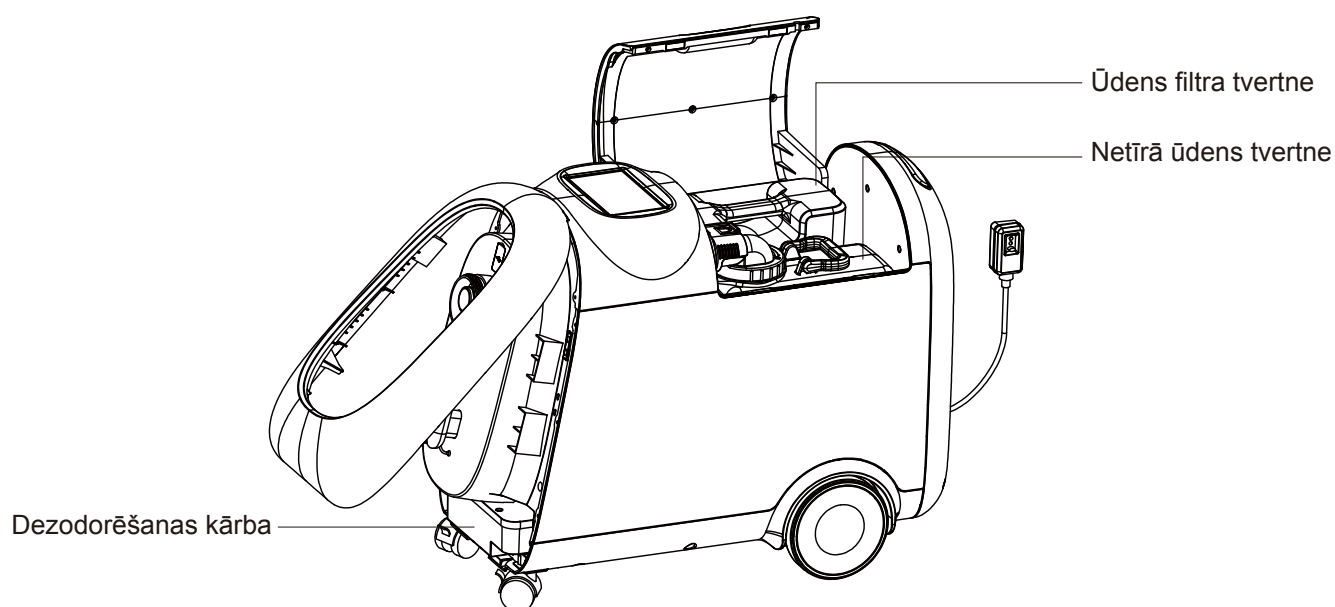


Netīrā ūdens tvertne

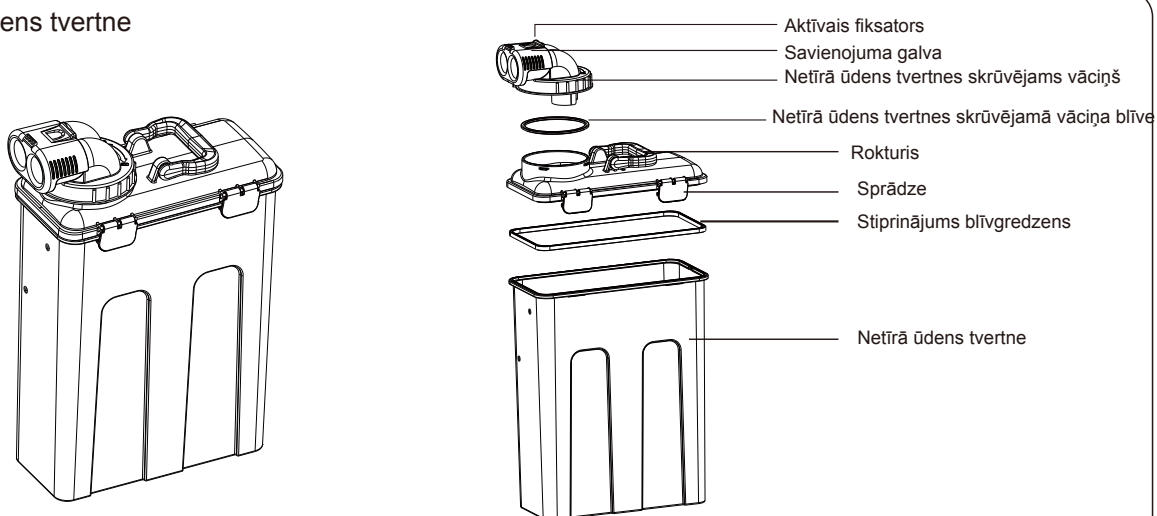


Ūdens filtra tvertne

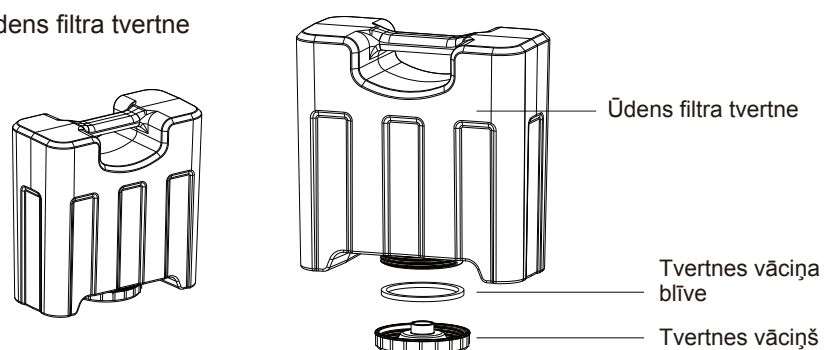

Dezodorēšanas kārba

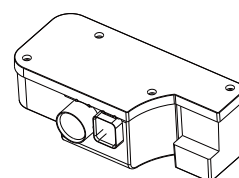

1.2.4 Displeja ekrāns

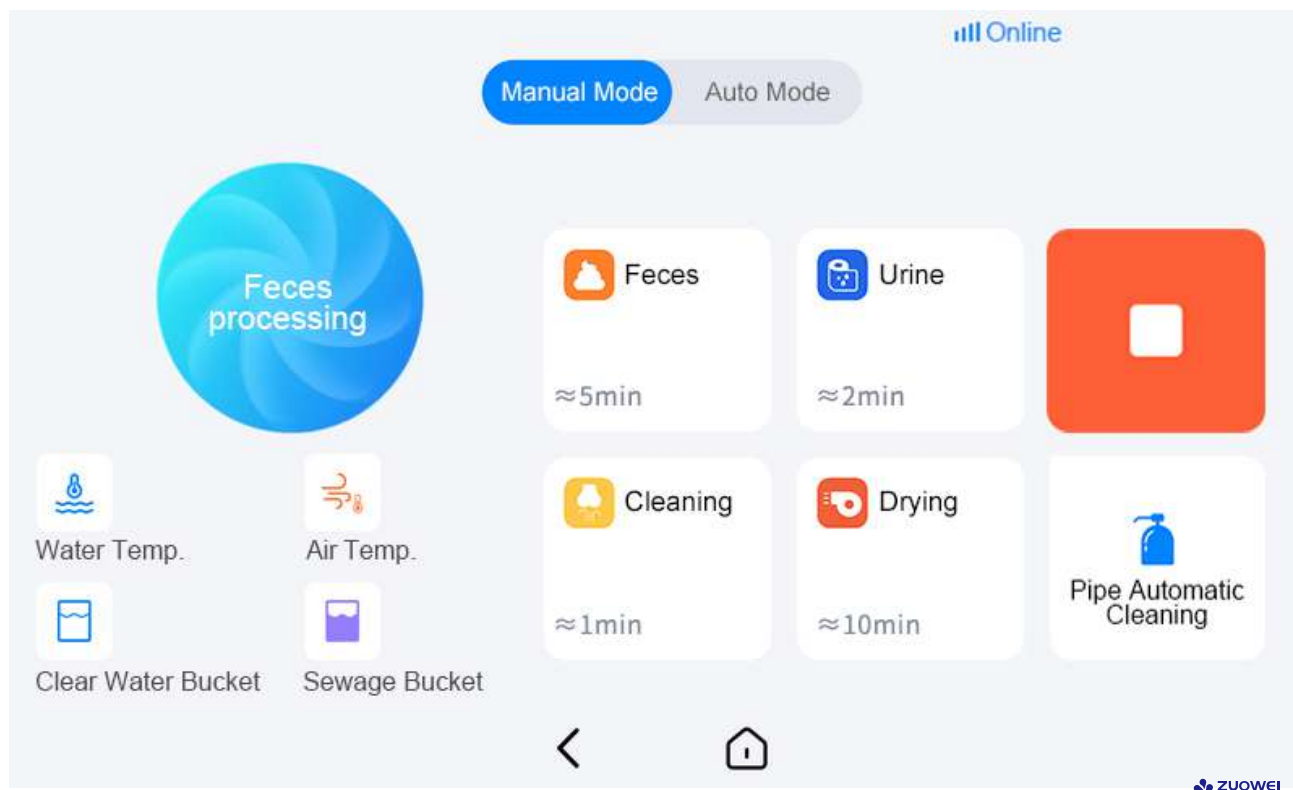

■ Režīma izvēle

Manual mode Izvēloties manuālo režīmu, tiks atlasīti šādi režīmi: “izkārnīties”, “urinēt”, “tīrīt”, “mazgāt” un “žāvēt”.


Automatic mode Kad ir ieslēgts automātiskais režīms, veiciet izkārnījumu un urinēšanas apstrādi.

Clean air Kad ir izvēlēts svaiga gaisa režīms, sistēma veic gaisa attīrīšanas darbību.

■ Manuālais režīms

Feces ≈5min	Nospiediet pogu, lai uzsāktu izkārnījumu tīrīšanas procesu.	Pipe Automatic Cleaning	Nospiediet pogu, lai uzsāktu darba galviņas iekšējās virsmas skalošanu.
Urine ≈2min	Nospiediet pogu, lai uzsāktu urinēšanas tīrīšanas procesu.	Drying ≈10min	Nospiediet pogu, lai uzsāktu žāvēšanas procesu.
Cleaning ≈1min	Nospiediet pogu, lai uzsāktu personas intīmo daļu mazgāšanu ar siltu ūdeni.		Pašreizējo apstrādes darbību apturēšana.

■ Iestatījumu lapa

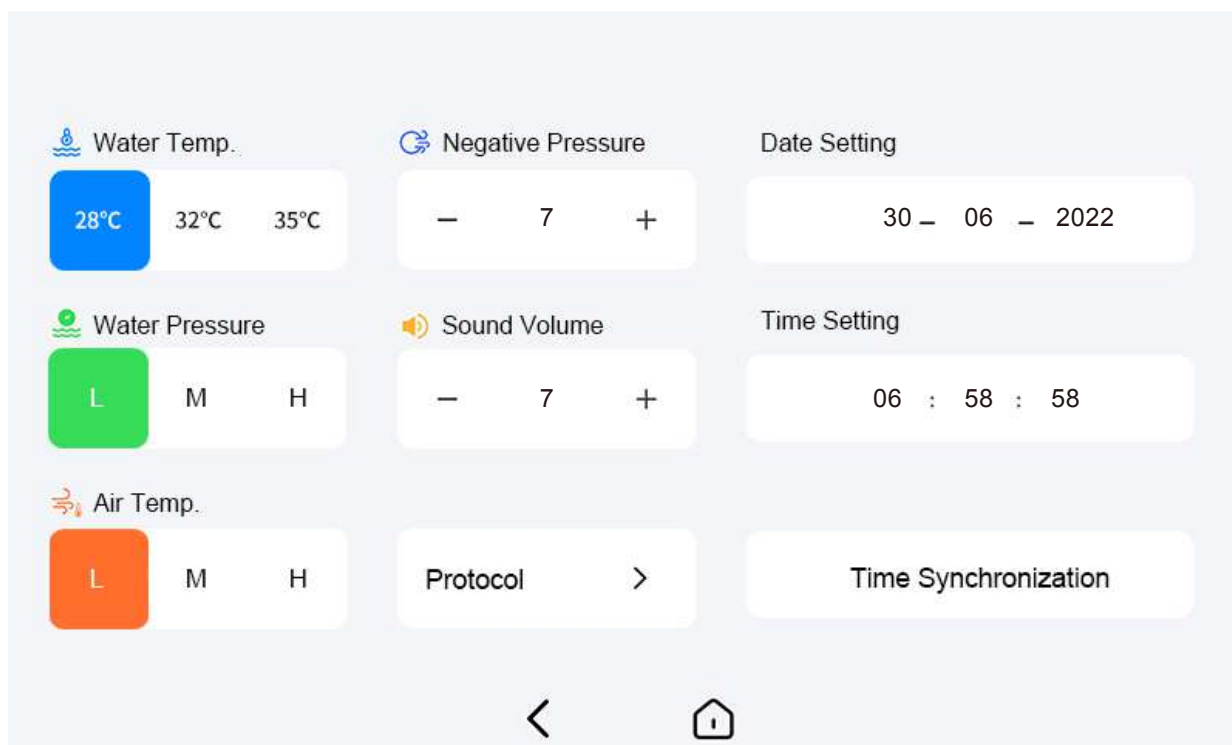

■ Statusa displejs



■ Pielāgošanas instrukcijas



Augstas vai zemas ūdens temperatūras regulēšanai, kopā ar trim regulējamiem iestatījumiem




Augstas vai zemas gaisa temperatūras regulēšanai, kopā ar trim regulējamiem iestatījumiem



Augsta vai zema ūdens spiediena regulēšanai, kopā ar trim regulējamiem iestatījumiem


■ Uzziņu lapa

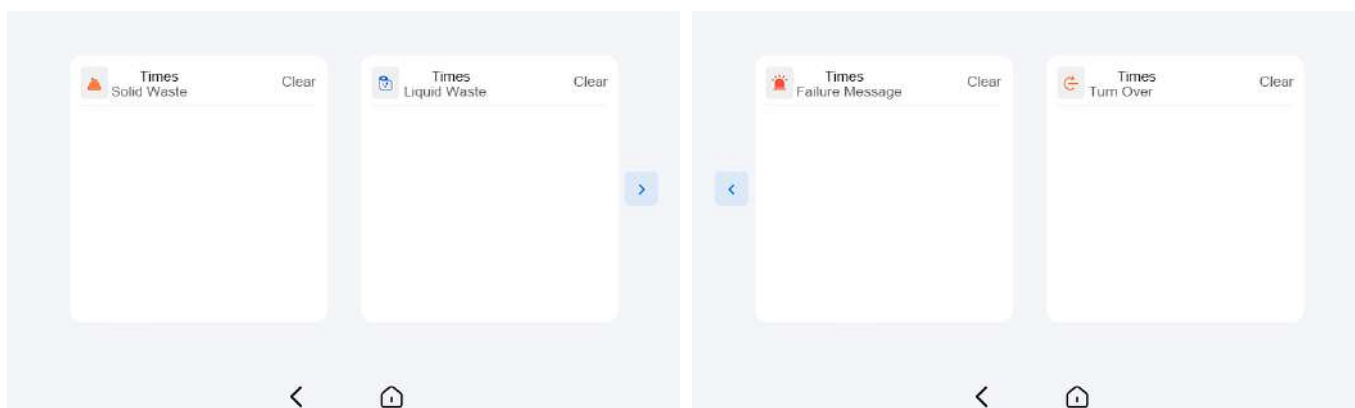


II. Uzstādīšana

2.1 Netīrā ūdens tvertnes uzstādīšanas metode

- ① Pagrieziet netīrā ūdens tvertnes vāciņu pulksteņrādītāja kustības virzienā logotipa pozīcijā.

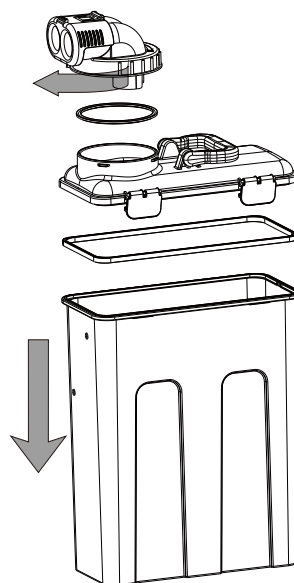

Ūdens sildīšanas tvertne

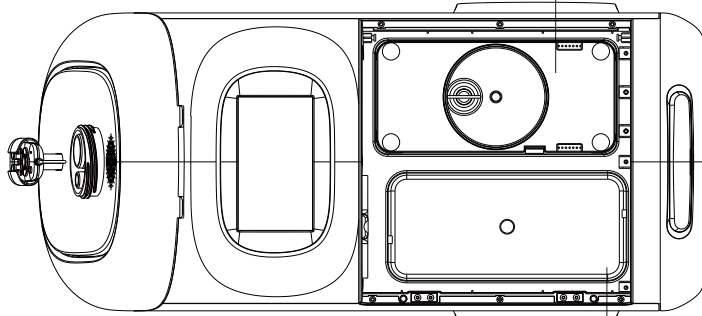


Netīrā ūdens tvertnes ievietošanas vieta

- ② Ievietojiet netīrā ūdens tvertni tai paredzētajā vietā.


- ③ Ievietojiet tvertni iekārtā, un tvertnes vāciņa augšējā gala kustīgā tapa tiks veiksmīgi iesprausta ierīces sūkšanas atveres spraugā, kas nozīmē, ka tvertne ir ievietota pareizā pozīcijā.

- ④ Lai izņemtu tvertni, nospiediet atbloķēšanas pogu, lai izņemtu kustīgo tapu.

Nospiediet aktīvo fiksatoru

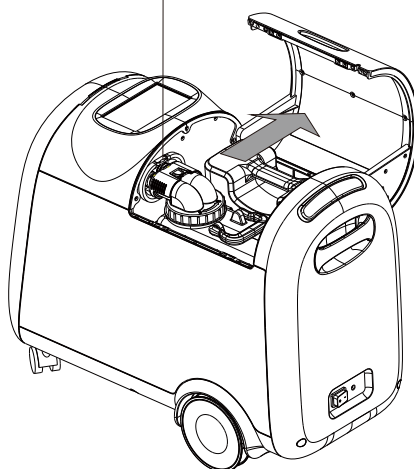

Nospiediet un pieturiet atbloķēšanas pogu uz leju, lai izvilktu aktīvo tapu uz āru.

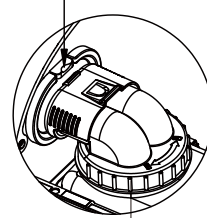


Pievērsiet uzmanību netīrā ūdens tvertnes skrūvējamā vāciņa blīvējumam

2.2 Ūdens filtra tvertnes uzstādīšanas metode


① Pagrieziet tvertnes vāciņu pulksteņrādītāja virzienā, lai pievilktu

② Ievietojiet ūdens filtra tvertni ar vāciņu uz leju

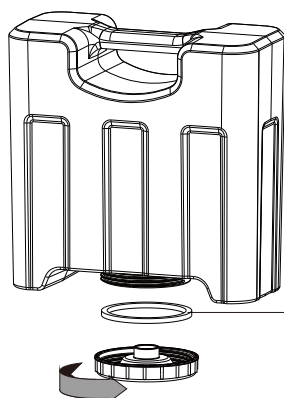



Nemiet vērā ūdens filtra tvertnes vāciņa blīvējumu

Ūdens filtra tvertnes ievietošana

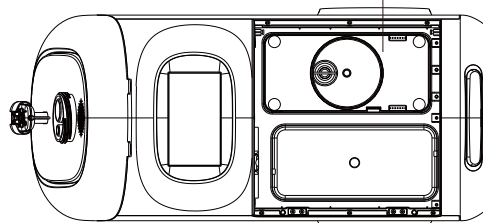


2.3 Dezodorēšanas kārbas uzstādīšana

① Ar rokas pirkstiem satveriet ierīces priekšējā vāka rokturi un pavelciet to savā virzienā.

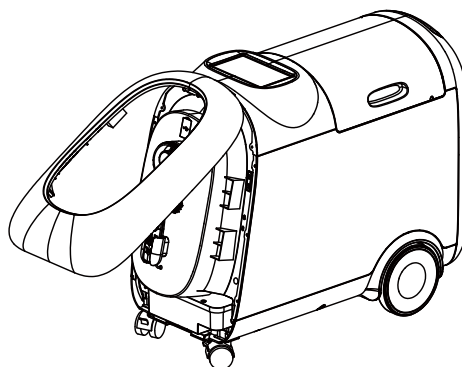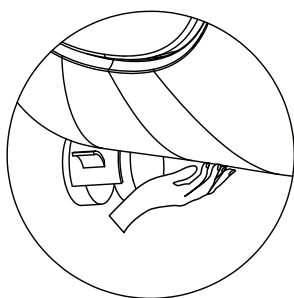

② Turot dezodoranta kārbu rokā, iebīdiet to montāžas atverē un ar nelielu spiedienu piespiediet uz leju.

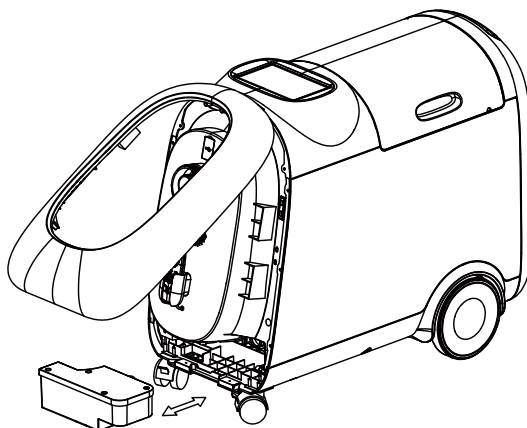


Lēnām ar roku aizveriet priekšējo vāku. Nemiet vērā, ka vāka pievilkšanas spēks ir liels, tādēļ esiet uzmanīgi, lai nesaspiestu roku

Padoms: Dezodoranta kārbas noņemšana tiek izmantota arī līdzīgā apgrieztā darbībā


2.4 Šļūtenes montāža ar resursdatora uzstādīšanu

① Satveriet šļūtenes netīrā ūdens caurules savienotāju, vispirms resursdatora vadu caur šļūtenes vada caurumu, pēc tam izlīdziniet un iespiediet resursdatora savienojuma daļu un, visbeidzot, šļūtenes komplekta signāla vadu un resursdatora vadu līnijas savienošanai.

Netīrā ūdens caurules šļūtenes savienojums
Resursdatora kabelis

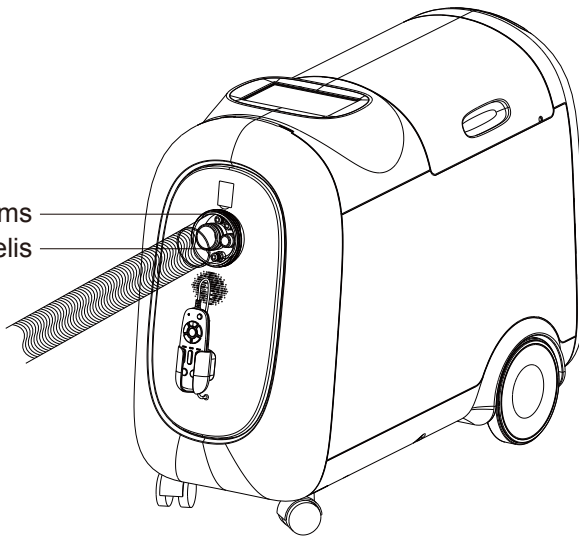

② Pagrieziet šļūtenes savienotāju pulksteņrādītāja virzienā, lai nofiksētu resursdatora savienojuma sekciju.

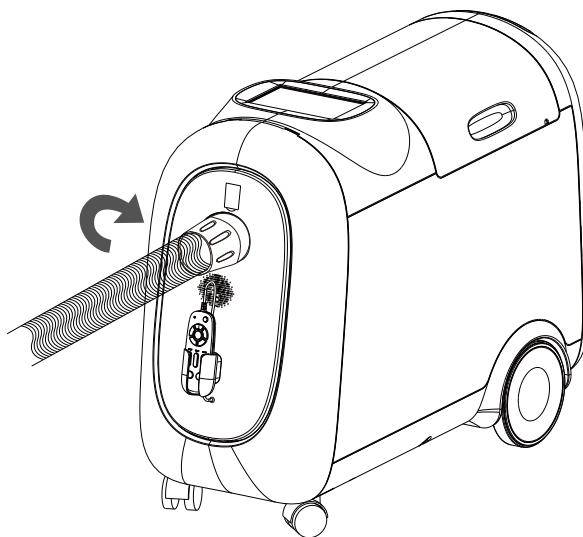

III. Darbības

3.1 Piemērojamība cilvēkiem


- 3.1.1 Bez katetra, bez urīna tilpuma kontroles;
- 3.1.2 Tie, kuriem nav izgulējumu, smaga dermatīta vai ādas bojājumi;
- 3.1.3 Ķermeņa svars ir lielāks vai vienāds ar 35 kg;
- 3.1.4 Nav nopietnu augšstilbu deformāciju;
- 3.1.5 Sausa un cieta izkārnījuma diametram jābūt mazākam par 33 mm;
- 3.1.6 Nav smagu hemoroīdu;
- 3.1.7 Nav psihiskas maniākālas uzvedības (piemēram, segas plēšana, izkārnījumu satveršana ar roku, autiņbiksīšu vilkšana);
- 3.1.8 Lietotājiem, kuri nevar apgulties taisni, izkārnīšanās laikā sānu leņķis nedrīkst būt lielāks par 45°.

3.2 Sagatavošanās ierīces palaišanai

- 3.2.1 Pārliedzinieties, ka savienojums starp darba galviņu un savienojošo šļūteni ir neskarts;
- 3.2.2 Pārliedzinieties, vai savienojums starp ierīci un savienojošo šļūteni ir neskarts;
- 3.2.3 Pārliedzinieties, ka ūdens filtra tvertne ir piepildīta un ievietota ierīcē;
- 3.2.4 Pārliedzinieties, ka netīrā ūdens tvertne ir iztukšota un ievietota ierīcē;
- 3.2.5 Pārliedzinieties, vai dezodoranta kārba ir pareizi ievietota ierīcē;
- 3.2.6 Pārliedzinieties, ka gurnu spilventiņi ir pareizi uzlikti;
- 3.2.7 Pārliedzinieties, ka noplūdes aizsardzības spraudnis ir pievienots strāvas padevei un ir iedegts darba indikators.


3.3 Ierīces tīrīšana

Uz ierīci nedrīkst tieši izsmidzināt un pirms tīrīšanas mazgāt, to var noslaucīt ar drānu.

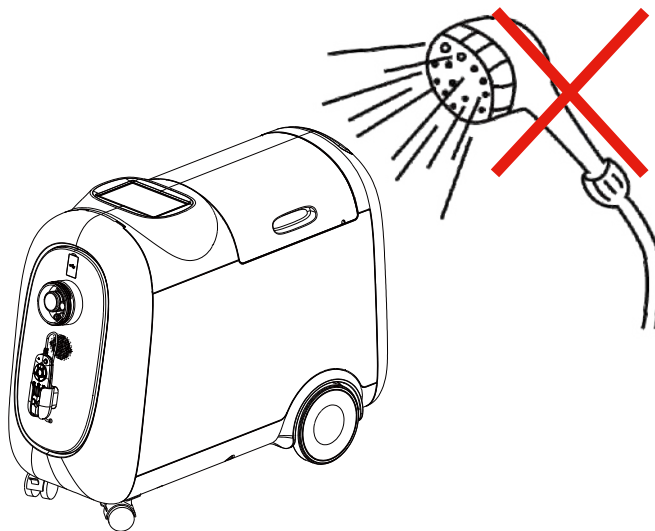

3.4 Ierīces apkope

Pirms ierīces pārvietošanas ir jāizlej ūdens no ūdens attīrīšanas tvertnes un jāiztīra netīrā ūdens tvertne un pēc tam jāatver drenāžas vārsts ūdens attīrīšanas tvertnes apakšā, lai atbrīvotu no ūdens galvenās ierīces iekšpusē.

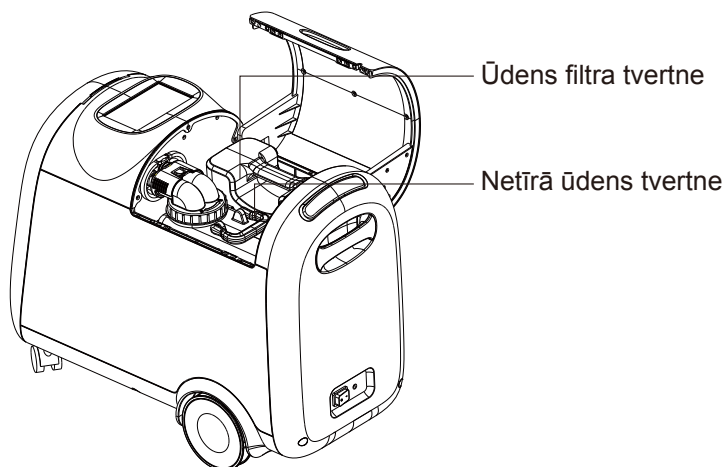

3.5 Lietošanas kārtība

Pirmajā lietošanas nedēļā tiek ievērots pakāpeniskas lietošanas princips, lai lietotājs varētu pakāpeniski pielāgoties viedā nesaturēšanas tīrīšanas robota lietošanai:

- 1 diena: 4h (dienas laikā)
- 2 diena: 8h (dienas laikā)
- 3 diena: 10h (dienas laikā)
- 4 diena: 12h (dienas laikā)
- 5 diena: 12h (vakarā)

Pēc tam ieteicams, lai katrs nepārtrauktas lietošanas laiks nepārsniegtu 12 stundas.

Uzmanību:

1. Pirms viedā nesaturēšanas tīrīšanas robota lietošanas pārbaudiet, vai darba galviņas pamatnē esošais Velcro ir saskaņots ar Velcro uz biksēm un vai darba galviņa precīzi iekļaujas bikšu U veida spraugā (sīkāku informāciju skatiet uz "Viedā nesaturēšanas tīrīšanas robota darba galviņas lietošanas instrukcijā").
2. Pēc katras viedā nesaturēšanas tīrīšanas robota lietošanas ir jāpārbauda, vai tā lietotāja āda nav apsārtusi vai bojāta. Ja ir šāds stāvoklis, laicīgi jāvērsas pie profesionāliem aprūpētājiem pēc ārstēšanas un jānogaida, līdz lietotāja āda ir pilnībā atveseļojusies.

3.6 Piesardzības pasākumi pirms un pēc ierīces lietošanas

3.6.1 Uzmanība lietošanas laikā

3.6.1.1 Pēc objekta pozīcijas maiņas izmantošanas (tostarp pagriešanās pa kreisi un pa labi, atkārtota apsēšanās pēc gulšanas u.tml.) ir jāpārliedzinās, vai darba galviņa nav vaļīga vai nepareizi noregulēta (koncentrējies uz augšstilbu iekšējo un mīkstās gumijas apstiprināšanu starp tām);

3.6.1.2 Ierīcei ir jāatrodas uz gultas; urinēšanas un izkārnīšanās laikā guļus sānu lenķis nedrīkst būt lielāks par 45°;

3.6.1.3 Kad iekārtas galā iedegas sarkana gaismiņa, jāziņo par ierīces darbības kļūmi, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un sniedziet atsauksmes ražotājam.

3.6.2 Piesardzības pasākumi pēc lietošanas

3.6.2.1 Pirms darba galviņas noņemšanas ieteicams veikt vienu manuālu tīrīšanas procesu;


3.6.2.2 Vispirms izslēdziet ierīci, pēc tam novelciet darba galviņu un bikses;

3.6.2.3 Pēc darba galviņas noņemšanas ir nepieciešams savlaicīgi iztīrīt netīrā ūdens tvertni.


3.7 Tīrīšana

3.7.1 Netīrā ūdens tvertnes tīrīšana

Atveriet Host grozāmo paneli, ar roku turiet kustīgo aizbīdni un pārnēsiet to līdz izlietnei. Izvelciet savienotāju un izceliet netīrā ūdens tvertni aiz roktura ar rokām.

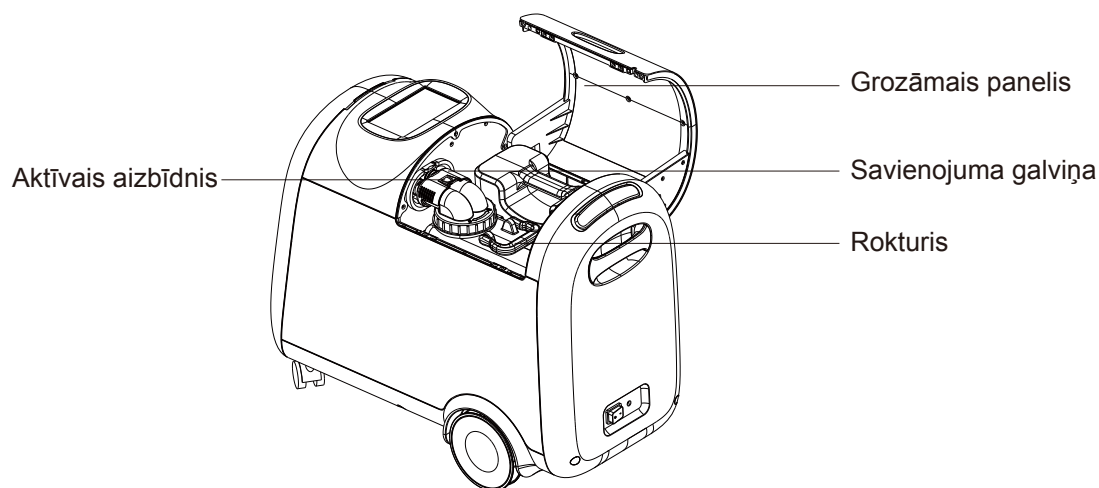

Pagrieziet netīrā ūdens tvertnes rokturi pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam, ar vienu roku pieturiet rokturi, ar otru - aizķeriet tvertnes dibenu un lēnām izlejiet netīro ūdeni izlietnē.

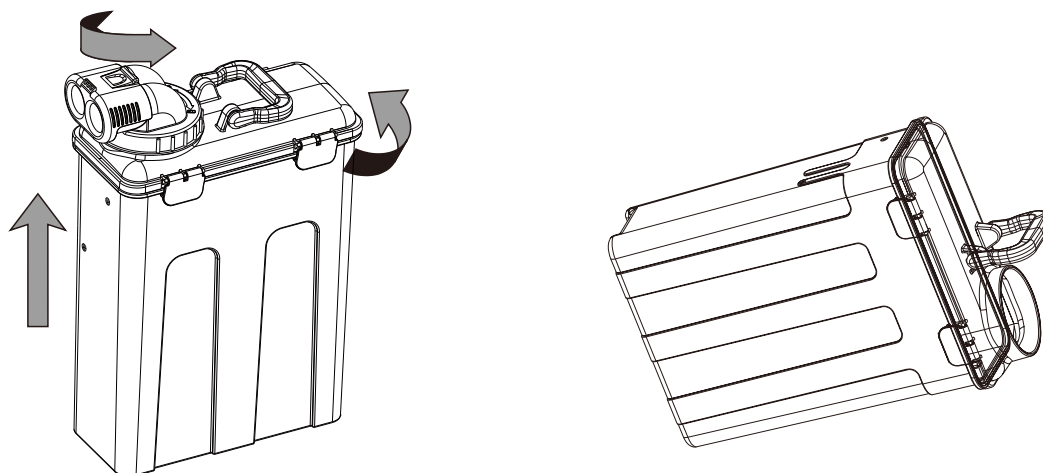

Jūs varat atvērt aizdāri ar tīru ūdeni vai ūdeni ar pievienotu tualetes tīrīšanas līdzekli, notīrot netīrā ūdens tvertnes ārējo virsmu ar tīru drānu vai kokvilnas audumu, noslaukiet to tīru un pēc tam atkal samontējiet (skatīt netīrā ūdens tvertnes uzstādīšanas metodi).

3.8 Automātiskais režīms

3.8.1 Automātiskā režīma iestatīšana

NESATURĒŠANAS TĪRĪŠANAS SISTĒMA (INCONTINENCE CLEANING SYSTEM) pēc noklusējuma ieslēdzas manuālajā režīmā. Pēc trīs minūtēm automātiski pārslēdzas uz automātisko režīmu. Kad viedais nesaturēšanas tīrīšanas robots ir ieslēgts, noklikšķiniet uz pogas displeja galvenajā saskarnē, lai atvērtu ierīces vadības lietotni.

3.8.1.1 Nospiediet pogu "Auto Mode" ("Automātiskais režīms") ierīces vadības saskarnē, sistēma pārslēdzas uz automātisko režīmu. Displeja ekrānā redzamās ikonas "Poop" ("izkārnīties"), "Pee" ("urinēt"), "Wash" ("mzgāt") un "Dry" ("žāvēt") ir pelēkas, un poga nav noklikšķināma. Tajā pašā laikā uz tālvadības pults tiek izgaismota poga "Auto".

3.8.1.2 Nospiediet pogu "Auto" uz tālvadības pults, ierīces vadības saskarne pašreizējā displejā vienlaikus pārslēgsies uz "Auto Mode". Ikonas "Poop", "Pee", "Wash" un "Dry" ir pelēkas, un pogas nav noklikšķināmas. Tālvadības pults poga "Auto" ir ieslēgta.

3.8.2 Kā darbojas automātiskais režīms

Kad NESATURĒŠANAS TĪRĪŠANAS SISTĒMA ir automātiskā režīmā, robots automātiski sāks iepriekš iestatīto programmu, lai savāktu ekskrementus, notīrītu un izžāvētu defekācijas zonu pēc tam, kad lietotājs būs izkārnījies. Ja darbības laikā process ir jāpārtrauc, lai apturētu pašreizējo darbību, noklikšķiniet uz pogas "Apturēt" displejā vai pieskarieties pogai "Apturēt" uz tālvadības pults.

3.9 Manuālais režīms

3.9.1 Manuālā režīma iestatīšana

Sistēma pēc noklusējuma pārslēdzas uz manuālo režīmu pēc aprūpes robota ieslēgšanas un automātiski pārslēdzas uz automātisko režīmu pēc trīs minūtēm. Automātiskā režīma pārslēgšanu uz manuālo režīmu var izdarīt divos veidos:

3.9.1.1 Nospiediet pogu "Manual Mode" ("Manuālais režīms") ierīces vadības saskarnē, lai pārslēgtu sistēmu manuālajā režīmā. Displeja ekrānā tiek aktivizētas ikonas "Poop" ("Izkārnīties"), "Pee" ("Urinēt"), "Wash" ("Mazgāt") un "Dry" ("Žāvēt"), un poga tiek atjaunota klikšķināmā stāvoklī. Tajā pašā laikā uz tālvadības pults ir iedegas poga "Manual" ("Manuāli").

3.9.1.2 Nospiediet tālvadības pults pogu "Manual" ("Manuāli"), ierīces vadības saskarne pašreizējā displejā vienlaikus pārslēgsies uz "Manual Mode" ("Manuālais režīms"). Ikonas "Poop", "Pee", "Wash" un "Dry" tiek aktivizētas, pogas atgriežas klikšķināmā stāvoklī. Tajā pašā laikā uz tālvadības pults iedegas poga "Manual" ("Manuāli").

3.9.2 Kā darbojas manuālais režīms

Kad NESATURĒŠANAS TĪRĪŠANAS SISTĒMA ir manuālā režīmā, galvenais dators iedarbina iepriekš iestatīto programmu, lai savāktu ekskrementus, iztīrītu un izžāvētu defekācijas zonu saskaņā ar tālvadības pults un displeja sniegto manuālās darbības informāciju. Darbības laikā, lai apturētu pašreizējo darbu, pieskarieties pogai "Stop" displejā vai nospiediet pogu "Stop" uz tālvadības pults.

3.10 Parametru iestatīšana un pieprasīšana

3.10.1 Parametru iestatīšana

Noklikšķiniet uz pogas "System Setting" ("Sistēmas iestatīšana") displeja galvenajā ekrānā, lai ieietu sistēmas iestatīšanas saskarnē.

3.10.2 Gaisa temperatūras iestatīšana

Sistēmas iestatīšanas saskarnē nospiediet gaisa temperatūras regulēšanas trīs iestatījumus, iestatiet gaisa temperatūru; nospiediet tālvadības pults gaisa temperatūras regulēšanas taustiņu "^" vai "v", lai iestatītu gaisa temperatūru.

3.10.3 Ūdens spiediena iestatīšana

Sistēmas iestatījumu saskarnē nospiediet ūdens spiediena regulēšanas trīs iestatījumus, iestatiet ūdens spiedienu; nospiediet tālvadības pults ūdens spiediena regulēšanas taustiņu "^" vai "v", lai iestatītu ūdens spiedienu.

3.10.4 Ierakstu pieprasīšana

Nospiediet pogu "Record Inquiry" ("Ierakstu pieprasīšana"), lai ieietu ierakstu saraksta saskarnē, jūs varat pieprasīt informāciju par izkārnījumiem, urinēšanu, kļūdu informāciju u.c. Varat pārbaudīt visu nepieciešamo informāciju.


IV. Drošības brīdinājumi

Risks


4.1.1 Ir stingri aizliegts ūdens attīrīšanas spainī iepildīt karstu ūdeni, kura temperatūra pārsniedz 40 grādus.




4.1.2 Tīrot ierīci, vispirms ir jāatslēdz strāvas padeve. Neizmantojiet organiskos šķīdinātājus vai kodīgus mazgāšanas līdzekļus.

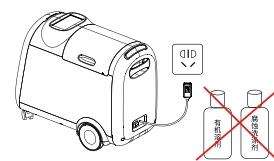


4.1.3 Lūdzu, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un lietojiet ierīci, stingri ievērojot šajā rokasgrāmatā norādītās darbības metodes un piesardzības pasākumus. Ja uz ādas parādās apsārtums un pūslīši, ko izraisa lietotāja ķermeņa īpatnības vai nepareiza ierīces lietošana, lūdzu, nekavējoties pārtrauciet iekārtas lietošanu un pagaidiet, līdz āda atgriežas normālā stāvoklī, pirms to atkal lietojat.

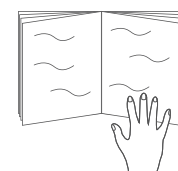


4.1.4 Nenovietojiet izsmēķus vai citus viegli uzliesmojošus materiālus uz Host virsmas vai ierīces iekšpusē, lai novērstu iekārtas bojājumus vai aizdegšanos.

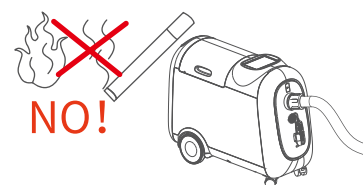


4.1.5 Ūdens ir jāpievieno ūdens attīrīšanas tvertnei. Ja ūdens attīrīšanas tvertnē ir atlikums, karsējot tvertni ilgāk par trim dienām bez tās izmantošanas, atlikušais ūdens ir jāiztīra un pēc tam jāpievieno jauns ūdens.

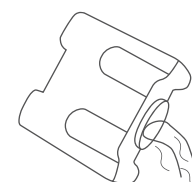

4.1.6 Nelejiet ūdeni vai citus šķidrumus tieši virs galvenās ierīces, lai izvairītos no ierīces bojājumiem vai elektriskās strāvas trieciena riska.

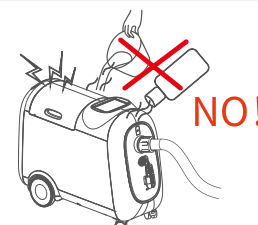


4.1.7 Neprofesionāls personāls nedrīkst izjaukt viedo nesaturēšanas tīrīšanas robotu, lai izvairītos no traumatisma un aprīkojuma bojājumiem.

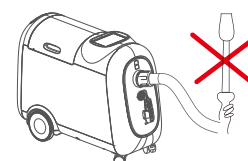


Brīdinājums


4.2.1 Lai neradītu iekārtas bojājumus, neizdariet sitienus pa ierīci.

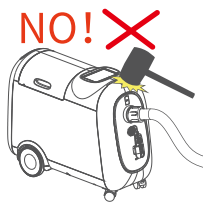


4.2.2 Nevelciet un neraustiet tālvadības pults savienojuma kabeli, lai tas nesaplīstu.

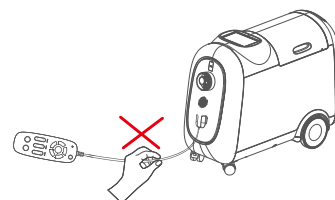


4.2.3 Viedo nesaturēšanas tīrīšanas robotu izmantojiet vidē, kuras temperatūra ir 5°C-40°C un mitrums 25-85%.

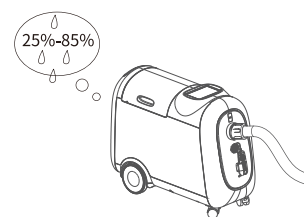


4.2.4 Noņemot darba galviņu, vispirms noteikti pieskarieties tai vispirms virs Host, lai novērstu šļūtenes komplektā palikušo netīrumu izplūšanu.

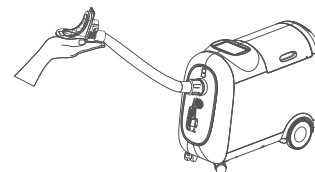

4.2.5 Noteikti novietojiet darba galviņu augstāk par Host, kad iekārta darbojas, lai novērstu ūdens atpakaļplūsmu.

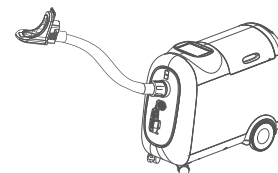


4.2.6 Neizmantojiet smagus priekšmetus, lai nespasiestu šļūtenes mezglu, kā arī neizlieciet pārlietu nesalieciet pašu šļūteni.

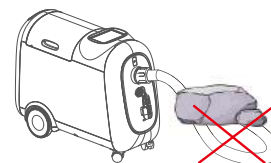


Warning


4.2.7 Neizmantojiet nepareizu spriegumu, lai neradītu ierīces bojājumus.

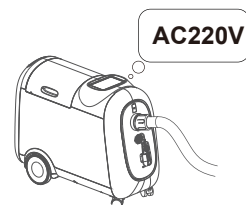


4.2.8 Ja strāvas vads ir bojāts, lai izvairītos no briesmām, tas jānomaina profesionālam pārstāvim no ražotāja kompānijas (tā tehniskās apkopes vai līdzīgas nodaļas).

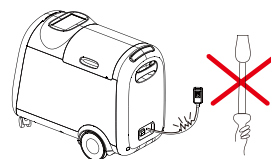

4.2.9 Fiziskiem, uztveres un spēju vai pieredzes un veselā saprāta trūkuma dēļ (tostarp bērniem) ierīces lietošana ir jāveic iekārtas apkalpojošā personāla vadībā, šo ierīci nedrīkst izmantot kā bērnu rotaļu ierīci.

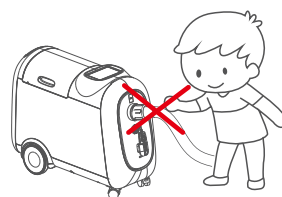

4.2.10 Šīs iekārtas aprīkojums ir jāuzstāda un jāizmanto barošanas sistēmās ar zemējumu.

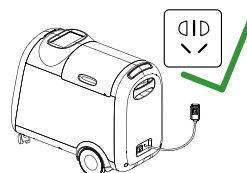

VEDĀ NESATURĒŠANAS TĪRĪŠANAS ROBOTA LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

V. Produktu saraksts



Viedā gultiņbiksīte




Šļūteņu komplekti




Apakšbikses



Autiņbiksītes

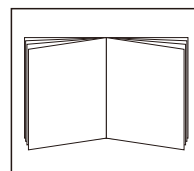

Rokasgrāmata

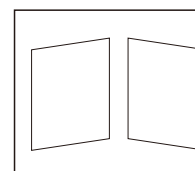

Lietotāja instrukcija

VI. Iepakojuma saraksts

Šļūteņu komplekti * 1 gab.	Garantijas karte * 1 gab.
Viedās autiņbiksītes * 1 gab.	Kvalitātes karte * 1 gab.
Apkšbikses/biksītes * 1 gab.	Autiņbiksītes * 10 gab.
Dimetilhidantoīna (DBDMH) dezinfekcijas tabletes * 1 gab.	Rokasgrāmata * 1 gab.
Lietotāja instrukcija * 1 gab.	Rezerves daļu komplekts * 1 gab.




Pirms biksīšu valkāšanas, lūdzu, pārliecinieties, ka lietotāja ādai nav izgulējumu, apsārtumu vai pūslīšu. Ja ir kāds no šiem apstākļiem, lietotājam nav atļauts lietot šo ierīci līdz brīdim, kamēr ir notikusi pilnīga atveseļošanās.

VII. Kā uzstādīt autiņbiksītes, bikses un viedās autiņbiksītes?




(1. attēls)

1. Uzlieciet autiņbiksītes uz viedās kumodes korpusa pamatnes, lieciet autiņbiksīšu lielo caurumu uz leju, salāgojiet autiņbiksīšu augšējā cauruma mazo izgriezumu ar viedo autiņbiksīšu skrūvi.

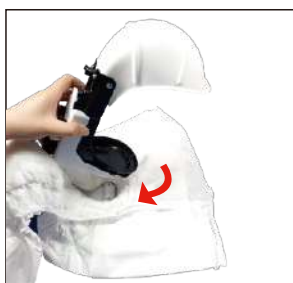

(2. attēls)

2. Atsauce (2. attēls). Novietojiet viedās autiņbiksītes pret skrūvi un nedaudz nolieciet to, nospiediet uz leju aizmugurējo galu, piespiediet līdz galam. Pārliecinieties, ka abus punktus neaizsedz autiņbiksītes, kā parādīts 1. attēlā.

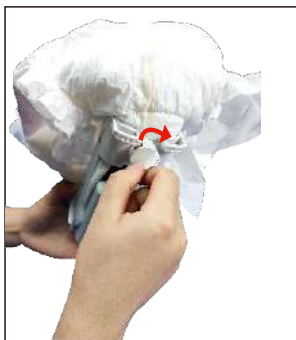


(3. attēls)

3. Pulkstenrādītāju kustības virzienā pagrieziet fiksatoru viedo autiņbiksīšu aizmugurē.




(4. attēls)

4. Autiņbiksītes un viedās autiņbiksītes ir savienotas.

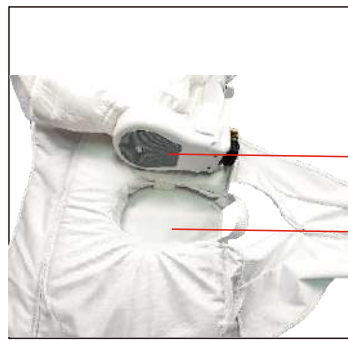

(5. attēls)

5. Viedo autiņbiksīšu apakšdaļā ir velcro uzlīme, un turiet to piestiprinātu pie paliktņa U-veida atverei/ligzdai.

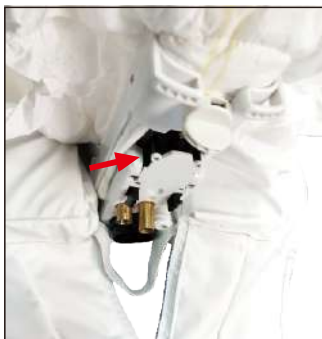

(6. attēls)

6. Pavelciet elastīgo auklu līdz augšējai rievai, pēc tam pabeidziet uzstādīšanu.

VIII. Uzstādiet šļūtenu komplektus un viedās autiņbiksītes

1. Uzstādiet šļūtenes galviņu ar viedo autiņbiksīšu pogu, kamēr saklausiet "klikšķa" skaņu, kas apliecinās to gatavību lietošanai.



(7. attēls)



(8. attēls)

IX. Kā uzgērbt viedās autiņbiksītes uz cilvēka ķermeņa?

1. Nolieciet viedās autiņbiksītes līdzās pacientam, pagrieziet viņa seju pretī aprūpētājam un pagrieziet ķermeni uz sāniem par 90°.



(9. attēls)



(10. attēls)



(11. attēls)

2. Atsaucoties uz 9. un 10. attēlu, novietojiet viedās autiņbiksītes un apakšbikses aiz lietotāja sēžamvietas un labi piestipriniet, pēc tam pagrieziet pacientu atpakaļ līdznā guļus stāvoklī.



(12. attēls)



(13. attēls)



(14. attēls)

3. Vispirms pielīmējiet autiņbiksītes pie lietotāja vidukļa, pēc tam pielīmējiet apakšbikses pie autiņbiksītēm.



(15. attēls)

5. Autiņbikses abās iekšējās augšstilba pusēs uz āru viegli pavelciet kārtībā, lai tās piegultu ādai cieši un nepaliktu spraugas, noregulējiet viedās autiņbiksītes atrašanās vietu.




(16. attēls)

6. Visbeidzot, pielīmējiet bikses ar jostu. piestipriniet šļūteni gultas galā, šļūtenei uz gultas no viedās autiņbiksītes līdz galvenajai ierīcei nedrīkst būt salocīta, lai ūdens šļūtenē var viegli noplūst uz netīrā ūdens tvertni.

Gatavs

X. Viedo autiņbiksīšu novilkšana no cilvēka ķermeņa

1. Atveriet apakšbikses un noņemiet līpošo lenti, atveriet lentes auklas uz viedajām autiņbiksītēm, visbeidzot, kā parādīts (19. attēlā), noņemšanu veiciet 90 grādu leņķī, noņemiet.

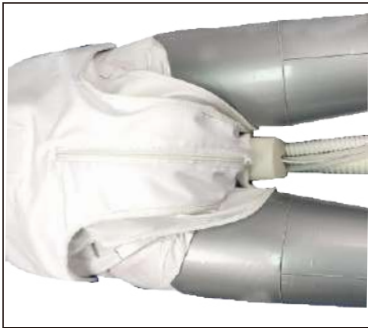

(17. attēls)



(18. attēls)



(19. attēls)



(20. attēls)

Atvienojot viedās autiņbiksītes un šļūteni, nospiežot šo pogu, lai noņemtu.

XI. Viedo autiņbiksīšu tīrīšana un apkope

1. Viedās autiņbiksītes nedrīkst tieši mērcēt ūdenī: vispirms mazgājiet ar ūdens aerosolu un nelielu birstīti, viegli notīriiet (23. attēls); otrkārt, izmantojiet dezinfekcijas ūdeni ar dimetilhidantoīnu (DBDMH), lai izskalotu viedās autiņbiksītes, un visbeidzot noslaukiet to sausu.



(21. attēls)



(22. attēls)



(23. attēls)

XII. Problēmu novēršana

Bojājuma apraksts	Problēmas iemesls	Izslēgšanas metodes
Ierīce nereaģē pēc barošanas avota pievienošanas vai ieslēgšanas taustiņa nospiešanas.	Kontaktlīdzi nedarbojas	Pārbaudiet, vai kontaktlīdzi ir zem sprieguma, tikai tad to nomainiet
	Nav nospiesta aizsardzības pret noplūdi kontaktdakšas atiestatīšanas poga	Nospiediet atiestatīšanas pogu
	Pārsprādzis drošinātājs	Palūdziet klientam nomainīt drošinātāju
	Aizsardzības pret noplūdi kontaktdakša ir bojāta	Meklējiet pēcpalīdzības servisu, lai nomainītu noplūdes aizsardzības kontaktdakšu
Tīrā ūdens tvertnes noplūde	Nav pievilks tvertnes vāks	Pievelciet tvertnes vāku
	Vienvirziena vārsta blīvīgredzens ir bojāts	No jauna uzstādiet blīvīgredzenu
	Bojāts rotācijas vāka blīvīgredzens	No jauna uzstādiet blīvīgredzenu
	Bojāts tvertnes apvalks	Lūdziet pēcpalīdzības dienestu iztīrīt tvertni
Netīrā ūdens tvertnes noplūde	Bojāts netīrā ūdens tvertnes apvalks	Lūdziet pēcpalīdzības dienestu nomainīt netīrā ūdens tvertni
Ierīce nedarbojas	Ierīces defekts	Atbilstoši LCD ekrānā redzamajam saturam un balss traucēšanas informācijai novērst vai atrast pēcpalīdzības apstrādi
Šļūtenes savienojuma noplūde	Nav pievilks galvenais savienotājs vai tas ir vaļīgs	Pievelciet savienojumu un satvērēju
	O gredzens nav noslogots vai ir novirzīts	Pievelciet savienojumu un satvērēju
Ierīces darbības laikā ekskrementus nevar savākt	Cauruļvada aizķeršanās	Pievelciet savienojumu un satvērēju
	Slikts blīvīgredzens	Pievelciet savienojumu un satvērēju
	Dezodoranta filtrs ir aizsērējis	Nomainiet dezodorētāja filtru
Dušas galviņa neizsmidzina ūdeni	Ir aizsprostots sildāmā ūdens tvertnes filtra siets	Notīriet filtra sietu ar tīru ūdeni
	Ūdens cauruļvads ir aizsērējis	Izmeklējiet pēcpalīdzības izslēgšanu
Ūdens nav uzsildīts	Sildītājs izdeg	Atrodiet pēcpalīdzības servisu
	Vadības paneļa bojājums	Atrodiet pēcpalīdzības servisu
Dušas galviņa ar šļūtenes savienojumu ir noplūdusi	Dušas galviņa nav cieši savienota ar šļūteni	Atrodiet pēcpalīdzības servisu
	Šļūtenes savienojuma blīvīgredzens noveco	Nomainiet blīvīgredzenu
Ierīces noplūde	Ierīces iekšpusē esošā ūdens caurule ir bojāta	Atrast pēcpalīdzības izslēgšanu
	Ūdens caurules hermētiskums ierīcē ir vaļīgs	Atrast pēcpalīdzības izslēgšanu
No ierīces nāk ļoti nepatīkama smaka	Gaisa attīrīšanas ierīce nedarbojas	Nomainīt
	Aktīvās ogles filtra sieta atteice	Nomainīt
Sānu noplūde rodas, kad darba zonde ir tuvu cilvēka ķermenim	Savienojums nav cieši pieguļošs	Pārbaudiet, vai cilvēka ķermenis atrodas tuvu iekārtas darba zonai
	Bikstēm ir vaļīgs savienojums	Pārbaudiet, vai jūsu bikstes nav vaļīgas
Anālā skalošana nav tīra	Korpuss un darba zonde nav saskaņoti	Pārbaudiet, vai jūsu bikstes nav vaļīgas
	Neliels izkārnījumu daudzums nav iekritis savākšanas tvertnē	Pirms darba zondes noņemšanas izkārnījumu plūsmu veic vienu reizi manuāli

XIII. Specifikācijas

Nosaukums	Viedais nesaturēšanas tīrīšanas robots	Nominālā frekvence	50-60Hz
Nominālais spriegums	110~240V	Nominālā strāva	9A
Maksimālā jauda	2200W	Lietošanas vieta	Iekštelpas

IXV. Tehniskā apkope un remonts

7.1 Katru reizi (apmēram vienu mēnesi) izņemiet sildāmā ūdens tvertnes starpsienu, noslaukiet tvertnes virsmu un starpsienu ar tīru drānu, lai noņemtu ūdens pīles un citus pielipušos netīrumus.

7.2 Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, atvienojiet noplūdes aizsardzības kontaktdakšu, vienlaikus iztukšojiet ūdens attīrīšanas tvertni, netīrā ūdens tvertni un iztukšojiet sildāmā ūdens tvertni.

7.3 Ik pēc sešiem mēnešiem jānomaina dezodorēšanas komponentu kārba, lai panāktu vislabāko gaisa attīrīšanas efektu.

7.4 Šļūtenes mezglu, darba galviņu ieteicams nomainīt reizi sešos mēnešos. Piezīme: lūdzu, iepriekš minētās apkopes laikā atslēdziet strāvas padevi.

XV. Produkta otrreizēja pārstrāde

Kad šīs ierīces kalpošanas laiks būs beidzies, lūdzu, nosūtiet to uz piemērotu tehnikas savākšanas vietu, lai tādējādi aizsargātu vidi.

XVI. Tehniskā apkope

9.1 Garantijas apraksts:

9.1.1 VIEDĀ NESATURĒŠANAS TĪRĪŠANAS ROBOTA ražotājs nodrošina garantiju bezmaksas vienu gadu, otro gadu bez remonta pakalpojuma maksa tiek iekasēta tikai par rezerves daļām: galvenie piederumi (darba galviņa un savienojuma šļūtenes mezgls) bezmaksas garantijas periods ir seši mēneši. Garantijas perioda sākuma datums ir atkarīgs no tā, kad ierīce ir iegādāta.

9.2.2 Lūdzu, saglabāiet pirkuma čeku un karti kā garantijas apliecinājumu, pēc rēķina maiņas garantija zaudē spēku.

9.3.3 Klientiem, kuru garantijas termiņš ir beidzies, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu, kas jūs laipni apkalpos.

9.2 Atruna:

9.2.1 Nav pirkuma rēķina un garantijas kartes.

9.2.2 Ierīces bojājumi, kas radušies nepareizas sprieguma lietošanas dēļ.

9.2.3 Bojājumi, kas radušies, pašiem veicot demontāžu vai remontu.

9.2.4 Nepārvaramas varas apstākļu (piemēram, zemestrīces, ugunsgrēka, kara u. c.) izraisīti bojājumi.

9.2.5 Klienti, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, neatbilstību šai rokasgrāmatai izraisa ierīces bojājums, ādas apsārtumus, čūlas, izgulējumus, infekcijas utt.

9.3 Atgriešanas un apmaiņas noteikumi:


9.3.1 Produkta darbības traucējumi 7 dienu laikā no pārdošanas datuma, patērētājs var izvēlēties atgriezt, apmainīt vai labot.

9.3.2 Produkta darbības traucējumi 15 dienu laikā no pārdošanas datuma, patērētājs var izvēlēties atgriešanu, apmaiņu vai remontu.

XVII. Etiķetes, iepakojuma logotipa dizains


Simbols	Skaidrojums	Simbols	Skaidrojums
	Partijas numurs		CE simbols
	Brīdinājumi un piesardzības pasākumi		Nesterils
	Medicīniskā ierīce		Ražošanas datums
	Ražotāja nosaukums, adrese		Eiropas Savienības pārstāvja nosaukums un adrese
	Ražošanas valsts		Modeļa numurs
	Izplatītājs		Ražotājs
	Ierīces unikālais identifikators		

Pilnvarotais izplatītājs Eiropā

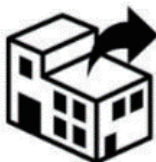

SIA "MĀJAS APRŪPE"
 Reģ.Nr.40003553254
 Faktiskā adrese: Ernestīnes 24 – 2, Rīga, LV – 1046
 Tālrunis: +371 29 35 21 21

Pilnvarotais pārstāvis Eiropas komisijā

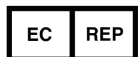

SUNGO Europe B.V.
 Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands SRN:NL-AR-000000247

Ražotājs



Uzņēmums: Shenzhen Zuowei Technology Co.,Ltd.
 Adrese: Floor 2nd,Building 7th, Yi Fenghua innovation industrialpark,Xinshi Subdistrict,
 Dalang street, Longhua District,Shenzhen
 Tāl: 0755-23739060



Mājaslapa: www.majasaprupe.lv
E-pasts: info@majasaprupe.lv